

DOPORUČENÍ ÚDRŽBY PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PODPORU DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU

Přístroj umístěte na pevnou podložku ve výši hlavy v dosahu čerstvého vzduchu. Neumísťujte jej na zem, do postele, do nočního stolku či vysoko nad hlavu. Před prvním použitím pečlivě prostudujte následující instrukce i návod k použití přístroje. Při infekci dýchacích cest přístroj NEUŽÍVEJTE!

VYČISTĚTE

Denně:

Polštářek masky ráno po použití opatrně vytřete vlhkým ubrouskem.

Nádobku zvlhčovače ráno po použití vyprázdněte, vypláchněte teplou vodou a nechte vyschnout. Před použitím plňte čerstvou destilovanou, případně převařenou vodou.

Týdně:

Masku rozeberte a jednotlivé části pečlivě umyjte ve vlažné mýdlové vodě a důkladně propláchněte.

Po úplném vyschnutí masku opět pozorně složte. Popruhy masky perte dle potřeby.

Nádobku zvlhčovače rozeberte a vymyjte jako masku. Rozloženou nádobku můžete rovněž umýt v horním koši myčky na 40°C. Sediment na stěnách nádoby odstraňte roztokem kyseliny citronové.

Hadici umyjte ve vlažné mýdlové vodě, vypláchněte a vyvěšenou nechte důkladně vyschnout. Nevystavujte hadici přímému slunci či teplu z topného tělesa.

Filtr vyklepejte a v případě potřeby vyměňte! Nikdy neperte!

Měsíčně:

Přístroj a zvlhčovač otřete vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě.

KONTROLUJTE

Polštářek masky a olivky

Jsou okraje polštářku masky nebo olivek do nosu ztuhlé nebo popraskané? Je polštářek neprůhledný nebo zakalený? Pociťujete při použití snížený komfort, popřípadě zarudnutí či podráždění kůže?

Maska

Je nutno hlavový díl nadměrně napínat pro zabránění úniku tlaku okolím masky?

Je hlavový díl nadměrně opotřebovaný, nepruží, popřípadě zapáchá?

Hadice (standardní i vyhřívaná)

Začíná se na Vaší hadici objevovat zakalení průhledných částí nebo trhliny?

Filtr

Vyazuje filtr známky opotřebení, má změněnou barvu nebo je proděravělý?

Zvlhčovač

Je dno či horní kryt nádoby zvlhčovače zbarvený, zkalený nebo popraskaný?

V případě, že si můžete na některou z otázek odpovědět kladně, příslušnou část vyměňte!

VYMĚŇTE

Každý 1 rok: **Masku, hadici a filtr.** Spoluúčast pacienta činí 25% z ceny příslušenství

Každé 2 roky: **Zvlhčovač.** Spoluúčast pacienta činí 25% z ceny příslušenství

Každých 10 let: **Přístroj na podporu dýchání ve spánku.** Jeho předpis je bez spoluúčasti pacienta.

V případě, že u výše zmiňovaných komponentů dojde k jakémukoli poškození či opotřebení znemožňující řádné používání přístroje před uplynutím jejich minimální životnosti, je možno příslušný díl zakoupit ve společnosti ResMed CZ s.r.o. bez spoluúčasti zdravotní pojišťovny.

Pro výměnu zdravotnického prostředku po uplynutí doby jeho životnosti kontaktujte pracoviště spánkové medicíny, které Vám přístroj na podporu dýchání ve spánku indikovalo (kontakty naleznete na www.sleep-society.cz), popřípadě společnost ResMed CZ s.r.o.

PRŮKAZ UŽIVATELE PŘÍSTROJE NA PODPORU DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU

Osobní údaje/ Personal data:

Jméno/ First name:

Příjmení/ Surname:

Datum narození/ Date of birth: RČ/ ID:

Adresa/ Address:

Telefon/ Telephone: E-mail:

Prohlášení pro celní odbavení

Tímto se potvrzuje, že přístroj ResMed je zdravotnickou pomůckou určenou pro každodenní používání.

Declaration

To whom it may concern, we hereby confirm that device ResMed is a medical unit for every day use.

Použití v letadle

Společnost ResMed potvrzuje, že přístroj splňuje požadavky letecké normy RTCA/DO-160F Federálního leteckého úřadu (FAA).

Aircraft use

ResMed confirms that the device meets the requirements of aviation standards RTCA/DO-160F Federal Aviation Administration (FAA).

Nastavení léčby / Setting treatment:

Přístroj/ Device: SN:

Zvlhčovač/Humidifier: SN:

Maska/ Mask:

Nemocnice/ Hospital:

Lékař/ Physician:

Pojišťovna/ Insurance: